

Starshine Prothesen Finish

Starshine Prothesen Finish



Ihre Vorteile im Überblick:

- Reduziert den toxischen Restmonomergehalt von neu hergestellten prothetischen Arbeiten
- Verleiht der Prothese einen hochwertigen Eindruck
- Angenehme Geschmacksstoffe (Spearmint) erhöhen den Speichelfluss beim Einsetzen der Prothese und erhöhen somit auch die Haftung
- Die Akzeptanz Ihrer Arbeit beim Zahnarzt und beim Endkunden/Patienten wird deutlich erhöht
- Sehr gut auch zur Aufwertung von älteren prothetischen Arbeiten geeignet



Si-tec GmbH
Dental-Spezialartikel
Leharweg 2
D-58313 Herdecke

www.si-tec.de
info@si-tec.de

Tel +49 2330 80 69 4-0
Fax +49 2330 80 69 4-20

Zertifiziertes Qualitätssicherungssystem
EN ISO 13485
Certified Quality Management System
EN ISO 13485



Anwendungshinweise

Starshine Prothesen Finish

Beschreibung

Starshine Prothesen Finish dient zum Entfernen von Monomerresten von neu hergestellten Prothesen. Durch die entstehende Hochglanzoptik wertet das Prothesen Finish alle prothetischen Arbeiten auf und verleiht dem Objekt zudem einen angenehmen und frischen Geschmack. Der bekömmlich frische Spearmint-Geschmack auf der Prothesenoberfläche vermittelt dem Patienten von Beginn an ein angenehmes Tragegefühl und vermindert das auftretende Fremdkörpergefühl im Rachenraum und erhöht die Haftung durch vermehrten Speichelfluss. Auch ältere prothetische Arbeiten können nach der Reinigung durch das Spray optisch aufgewertet werden.

Anwendung

Die Applikation erfolgt durch möglichst dünnes Aufsprühen eines Filmes auf die Materialoberfläche. Aerosoldämpfe nicht einatmen. Die eingesprühte Oberfläche mit einem weichen Tuch abreiben und aufpolieren. Vorgang eventuell wiederholen. Ein Applikationsröhrchen dient zum gezielten Aufbringen des Starshine Prothesen Finish auf die zu säubernde Oberfläche.

Warnhinweise

Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht in offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Druckbehälter: Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach der Verwendung. Nur draußen oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Vor Sonnenlicht schützen. Nicht Temperaturen über 50°C/ 122°F aussetzen.



Best.Nr.

Starshine Prothesen Finish 1 x Dose 10 x Dosen Sparpack	3700 3700-10
--	-----------------